

GEBRAUCHSANWEISUNG

de

Fußschalter



WICHTIG

VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN

AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN

© Möller Medical GmbH
Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne die vorherige, schriftliche Genehmigung der Möller Medical GmbH in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise reproduziert und übersetzt werden. Der Stand der in dieser Gebrauchsanweisung dargestellten Informationen, Spezifikationen und Abbildungen ist durch die Versionsnummer auf der letzten Seite gekennzeichnet. Die Möller Medical GmbH behält sich das Recht vor, Änderungen bezüglich Technologien, Funktionen, Spezifikationen, Design und Informationen jederzeit und ohne Vorankündigung vorzunehmen.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Sicherheitshinweise.....	4
1.1	Erklärung der verwendeten Sicherheitssymbole.....	4
1.1.1	Symbole in der Gebrauchsanweisung.....	4
1.1.2	Symbole auf dem Gerät.....	4
1.1.3	Symbole auf der Handelsverpackung.....	4
1.2	Warnhinweise.....	6
1.3	Weitere Informationen.....	6
2	Produktbeschreibung.....	7
2.1	Zweckbestimmung.....	7
2.2	Fußschalter.....	7
2.3	Eintasten-Fußschalter.....	7
2.4	Dreitasten-Fußschalter.....	8
3	Hilfe bei Störung.....	9
4	Entsorgung.....	10

1 Allgemeine Sicherheitshinweise

1.1 Erklärung der verwendeten Sicherheitssymbole

In dieser Gebrauchsanweisung sind wichtige Hinweise visuell gekennzeichnet. Diese Hinweise sind Voraussetzung für den Ausschluss von Gefährdungen für Patient, Anwender und Dritte sowie für die Vermeidung von Beschädigungen bzw. Funktionsstörungen am Gerät.

1.1.1 Symbole in der Gebrauchsanweisung



Achtung



Hinweis bzw. Hilfe

1.1.2 Symbole auf dem Gerät



Artikelnummer



Fertigungslosnummer,
Charge



Herstellungsdatum (JJJJ-MM-TT)



Hersteller



Eindeutiger Identifikator eines Medizinproduktes



Medizinprodukte



Gebrauchsanweisung beachten

IPX7

Schutz gegen starkes Strahlwasser bzw. vor dem Eindringen von Wasser bei kurzzeitiger Überflutung

IPX8

Schutz gegen starkes Strahlwasser bzw. vor dem Eindringen von Wasser bei dauernder Überflutung














Rücknahme und Entsorgung erfolgen nach der WEEE-Richtlinie

1.1.3 Symbole auf der Handelsverpackung



Gebrauchsanweisung beachten

Allgemeine Sicherheitshinweise

	Achtung
	Artikelnummer
	Fertigungslosnummer, Charge
	Eindeutiger Identifikator eines Medizinproduktes
	Medizinprodukte
	Herstellungsdatum (JJJJ-MM-TT)
	Hersteller
	Temperaturbegrenzung
	Verpackungseinheit
	Rücknahme und Entsorgung erfolgen nach der WEEE-Richtlinie
	Vorsicht: Gemäß US-Amerikanischem Bundesrecht darf dieses Produkt nur an einen Arzt oder auf Bestellung eines Arztes verkauft werden.

Weitere Informationen zu den verwendeten Symbolen finden Sie auf unserer Homepage:
www.moeller-medical.com/glossary-symbols

1.2 Warnhinweise



- Eine Änderung der Geräte ist nicht erlaubt.
- Es dürfen keine Flüssigkeiten in die spannungsführenden Teile des Geräts eindringen.
- Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass kein Reinigungsmittel in die Stecker Buchsen läuft.
- Ziehen Sie vor der Reinigung das Netzkabel ab.
- Tauschen Sie Anschlusskabel aller Art bereits bei geringfügigen Beschädigungen aus und achten Sie darauf, die Kabel nicht zu überrollen.
- Halten Sie die Kabel von Wärmequellen fern. Dadurch verhindern Sie, dass die Isolierung schmilzt, was zu einem Brand bzw. Stromschlag führen kann.
- Drücken Sie die Stecker nicht mit Gewalt in die Buchsen.
- Ziehen Sie beim Abziehen von Steckern nicht am Kabel. Lösen Sie zum Abziehen gegebenenfalls die Verriegelung der Stecker.
- Setzen Sie die Geräte keiner starken Hitze oder Feuer aus.
- Setzen Sie die Geräte keinen harten Stößen aus.
- Wenn Hitze, Qualm oder Rauch auftritt, trennen sie die Geräte umgehend vom Stromnetz.

1.3 Weitere Informationen

Beachten Sie die weiteren Informationen und Hinweise in den Gebrauchsanweisungen der **Vibrasat®** und **Liposat®** Serie.

IFU Liposat® Pro/ Pro plus	93007211
IFU Liposat® power	20007190
IFU Vibrasat® Pro	93006825
IFU Vibrasat® power	92007180

Alle Gebrauchsanweisungen finden Sie auf unserer Homepage unter:
www.moeller-medical.com/ifu-ga

Produktbeschreibung

2 Produktbeschreibung

2.1 Zweckbestimmung

Mit Hilfe der Fußschalter können die Geräte der **Vibrasat**[®] und **Liposat**[®] Serie ferngesteuert werden.

2.2 Fußschalter

Es können gleichzeitig zwei Fußschalter an die Geräte angeschlossen werden (zutreffend für Pro Geräte). Beide Anschlussbuchsen an der Rückwand sind gleichberechtigt und die Fußschalter verhalten sich identisch. Die Anschlussbuchsen für die Fußschalter verfügen über farbige Ringmarkierungen. Befestigen Sie, falls vorhanden, die passenden farbigen Kabelmarkierungen an den Kabeln der Fußschalter zur sicheren Erkennung der korrekten Positionierung.



Achten Sie beim Einstecken des Fußschalters darauf, dass die Einkerbung am Stecker nach oben zeigt und somit in die Steckerbuchse passt. Eine verdrehte Montage führt zu fehlerhaften Funktionen der Geräte.

Die weiteren Kabelmarkierungen können Sie nutzen, um auch die Fußschalter Ihrer anderen Möller Medical Geräte farblich zu markieren und damit besser auseinanderhalten zu können.

Die Fußschalter haben dieselben Einstellungsmöglichkeiten wie die Tasten an den Geräten der **Vibrasat**[®] und **Liposat**[®] Serie.

2.3 Eintasten-Fußschalter



Abbildung 1: Eintasten-Fußschalter

Durch Betätigen der Taste des Fußschalters können die Geräte der **Liposat**[®] und **Vibrasat**[®] Serie gestartet und gestoppt werden.

Der Eintasten-Fußschalter kann wie folgt bestellt werden:

Produktbeschreibung

**Elektrischer Fußschalter
(2 m Kabellänge)**

Bestell Nr.: 93003545

**Elektrischer Fußschalter
(5 m Kabellänge)**

Bestell Nr.: 00003982

2.4 Dreitasten-Fußschalter



Down – Taste On/Off - Taste Up – Taste
Abbildung 2: Dreitasten-Fußschalter

Durch Betätigen der On/Off-Taste des Fußschalters können die Geräte der **Liposat®** und **Vibrasat®** Serie gestartet und gestoppt werden. Mittels der Up- und Down-Tasten des Fußschalters kann die Vibrations- oder die Fördergeschwindigkeit eingestellt werden.

Der Dreitasten-Fußschalter kann wie folgt bestellt werden:

**Dreitasten-Fußschalter
(2 m Kabellänge)**

Bestell Nr.: 93003517

**Dreitasten-Fußschalter
(5 m Kabellänge)**

Bestell Nr.: 00003981

Hilfe bei Störung**3 Hilfe bei Störung**

Fußschalter reagiert nicht	Das Anschlusskabel des Fußschalters ist nicht angeschlossen oder wurde falsch eingesteckt. Überprüfen Sie die Steckverbindung.
Sollten alle angegebenen Maßnahmen zu keinem Erfolg führen, wenden Sie sich an die Servicestelle der Möller Medical GmbH.	

Servicestelle der Möller Medical GmbH:**Möller Medical GmbH**

Wasserkuppenstrasse 29-31

36043 Fulda, Germany



Tel. +49 (0) 661 / 94 19 5 – 0

Fax +49 (0) 661 / 94 19 5 – 850

www.moeller-medical.cominfo@moeller-medical.com**Service**

Tel: +49 (0) 661 94195 - 108

Fax: +49 (0) 661 94195 - 850

E-Mail: service@moeller-medical.com

4 Entsorgung



Dieses Gerät enthält Material, das im Sinne des Umweltschutzes zu entsorgen ist. Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE2) betrifft dieses Gerät. Dieses Gerät ist daher mit dem Symbol einer durchkreuzten Abfalltonne auf dem Typenschild gekennzeichnet.

Senden Sie Geräte, die nicht mehr benutzt werden, an die Möller Medical GmbH zurück. Dadurch wird sichergestellt, dass die Entsorgung in Übereinstimmung mit den nationalen Ausführungen der WEEE-Richtlinie geschieht.



Bestellnummer der
Gebrauchsanweisung
(REF) 93007877



Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstrasse 29-31
36043 Fulda, Germany



Tel. +49 (0) 661 / 94 19 5 – 0
Fax +49 (0) 661 / 94 19 5 – 850
www.moeller-medical.com
info@moeller-medical.com